

تعليمات جمع عينات من الحمض النووي

<p>قمنا بتوريد فرشاتين لكل شخص. كل كيس يحتوي على فرشاة واحدة. يرجى اخذ عينتين من كل شخص.</p>	
<p>يجب عدم الاكل او الشرب او تفريش الاسنان قبل اخذ العينات على الاقل بنصف ساعة.</p>	 <p>½ hr before sampling</p>
<p>أمسك العصاة واسحب الفرشاة ولا تلمس نهايتها</p>	
<p>خذ عينة من الحمض النووي عن طريق كشط نهاية الفرشاة بجدار الفم الايمن ذهابا وإيابا, من الاعلى للأسفل مع التحريك بشكل دائري 20 مرة على الاقل. كرر العملية مرة اخرى بالفرشاة الثانية على الجانب الايسر</p>	
<p>بعد أخذ العينات اتركها على الاقل لمدة 30 دقيقة في الهواء لتجف قبل وضعها مرة أخرى في الغلاف. من المهم تجفيف العينات تماما ، لأن البكتيريا قد ربما تحط عليها اذا لم تجف جيدا</p>	 <p>air dry for 30 min.</p>
<p>بعد تجفيف العينات و وضعها في الظرف الخاص بها واغلاقه باحكام, يجب التأكد من رقم العينة على كل ظرف, لكي لا يحصل تداخل في العينات المتعددة .</p>	
<p>اخيرا وبعد اخذ العينة, قم بارسالها الى عنواننا في الاسفل. من المهم جدا تسجيل قيمة الفرشاة فقط!! وليس الفحص!! فاذا زادت القيمة على 1 دولار ستتسبب في تاخير العينة و ستقوم مصلحة الجمارك باحتساب رسوم اضافيه. YSEQ GmbH ♦ Kettinger Str. 32, 12305 Berlin, Germany</p>	<p>Phone: +49 30 24336272 IATA 3.6.2.2.3.8 Exempt Human Specimens CN22 Samples Plastic swabs Value: \$1 USD</p> <p>YSEQ A. Krahn Kettinger Str. 32 12305 Berlin GERMANY</p>