




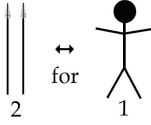


## Anleitung zur Testdurchführung

<p>Sie erhalten pro Person jeweils zwei Abstrichbürsten in verschließbaren Transporthüllen.</p> <p>Bitte jeweils <u>2 Proben pro Testperson</u> entnehmen.</p>	
<p>Eine halbe Stunde vor der Probennahme sollten Sie <u>nichts gegessen und getrunken</u> haben. Vor Abnahme der Proben den Mundraum mit Leitungswasser spülen. <u>Keine Mundhygiene</u> mit Zahnpasta oder ähnlichem vornehmen.</p>	 <p>1/2h vorher</p>
<p>Öffnen Sie die Hülle und nehmen Sie die Abstrichbürste am Griff heraus, <u>ohne den Bürstenkopf zu berühren</u>.</p>	
<p>Die Bürste an jeder Wangeninnenseite etwa <u>20 mal</u> drehend mit mäßigem Druck auf- und abbürsten. Achten Sie darauf, dass sie die <u>rollende Bewegung</u> der Bürste über die gesamte Wangeninnenseite ausführen. Dies gewährleistet, dass die Schleimhautzellen gleichmäßig abgenommen werden. Die Bürste ist weich. Es besteht keine Verletzungsgefahr.</p>	
<p>Nach Probennahme lassen Sie die Bürsten mindestens <u>dreiig Minuten an der Luft trocknen</u> bevor Sie diese in die Transporthüllen zurckstecken.</p> <p><b><i>Dieser Trocknungsvorgang ist wichtig, da er das Verderben der Proben verhindert.</i></b></p>	 <p><b>30 min. trocknen</b></p>
<p>Stecken Sie die Abstrichbürsten nach dem Trocknen in die Hllen zurck.</p> <p>Ziehen Sie den weien Folienstreifen ab und kleben Sie die Hllen zu.</p>	
<p>Nach Entnahme mssen die Proben <u>unverzglich</u> an YSEQ in Berlin gesandt werden.</p> <p>Ein Adressaufkleber liegt Ihrem Probenset bei.</p>	