


הוראות לאיסוף דגימות דנ"א (DNA)

<p>בכל ערכה המיועדת לאדם אחד יש 2 מברשות; כל מברשת נמצאת באריזה נפרדת. יש לקחת 2 דגימות מכל אדם.</p>	
<p>על הנדגמים לא לאכול ולשתות דבר, ולא לצחצח את שיניהם, לפחות 30 דקות לפני נטילת הדגימות.</p>	 <p style="text-align: center;">חצי שעה לפני נטילת הדגימות</p>
<p>משכו את המברשת על ידי אחיזת המקלון בקצה הרחוק מהמברשת. אל תשליכו את האריזה. אל תיגעו במברשת שבקצה המקלון!</p>	
<p>קחו את דגימת הדנ"א על ידי גירוד המברשת שבקצה המקלון קדימה ואחורה, בסך הכל 20 פעמים, בחלק הפנימי של כל לחי (החלק שבתוך הפה).</p>	
<p>לאחר נטילת הדגימות, תנו למברשות להתייבש באוויר למשך 30 דקות לפני שתכניסו אותן חזרה לאריזות. אין לגעת בידיים במברשות עצמן, מכיון שהדבר עלול לזהם את הדגימה ב- דנ"א זר! חשוב לייבש את הדגימות לחלוטין, מכיוון שחיידיקים שונים ישחיתו את דגימות ה- דנ"א אם הן יהיו בסביבה לחה.</p>	 <p style="text-align: center;">יבש באוויר למשך 30 דקות.</p>
<p>לאחר ייבוש הדגימות, החזירו את המברשות לאריזותיהן, ואיטמו כל אריזה. <u>אם בדקתם יותר מאדם אחד, היזהרו שלא לערבב בין הדגימות!</u> מיד לאחר שנלקחו הדגימות, יש לשלוח אותן בחזרה באמצעות הדואר. השתמשו בתווית שעליה מופיעה הכתובת שלנו. תודה.</p>	
	<p>Phone: +49 30 24336272 IATA 3.6.2.2.3.8 Exempt Human Specimens</p> <p>YSEQ A. Krahn Kettinger Str. 32 12305 Berlin GERMANY</p> <p>CN22 Samples Plastic swabs Value: \$1 USD</p>