




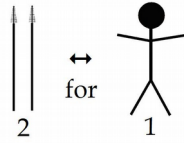

## Istruzioni per l'esecuzione del test (Spazzola di raschiatura della mucosa della bocca)

<p>Lei riceve per ogni persona rispettivamente due spazzole di raschiatura nei sacchetti di plastica.</p> <p>Prende <u>due campioni per persona</u> per favore.</p>	
<p>Un mezz'ora prima che il test, i probandi non devono mangiare o bere niente. Non fare l'igienico orale con pasta dentifricia o somigliante.</p>	
<p>Prendere la spazzola di raschiatura al manico fuori, senza toccare il capo. <u>La spazzola di raschiatura non deve essere toccata</u>, affinché nessuno forestiero DNA falsifichi i risultati!</p>	
<p>Spazzoli su e giù <u>circa 20 volte</u> colla spazzola all'ambo i lati intorno della guancia. Badi a ne, che esigue un <u>movimento rotolando</u> su tutto il lato della guancia. Questo garante, che le cellule di mucosa sono prese proporzionato. La spazzola è molle. Non c'è rischio di ferirsi.</p>	
<p>Dopo il prelevamento del campione lascia la spazzola <u>asciugare nell'aria per 30 minuti</u> prima che ne rimette nel sacchetto.</p>	
<p>Dopo il prelevamento, i campioni devono essere spediti <u>immediati</u> alla YSEQ.</p>	