




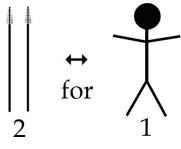

Istruzioni per l'esecuzione del test (Spazzola di raschiatura della mucosa buccale)

<p>Il test consiste di due spazzole di raschiatura per ogni persona che dovrà effettuare il test.</p> <p>Si prega di raccogliere due campioni per persona.</p>	
<p>Non mangiare, bere o eseguire l'igiene orale della bocca con dentifricio mezz'ora prima di effettuare il test.</p>	
<p>Afferrare la spazzola di raschiatura senza toccare le setole, affinché queste non si contaminino con DNA estraneo.</p>	
<p>Spazzolare su e giù, per circa venti volte, entrambi i lati delle guance; successivamente, eseguire un movimento rotatorio della spazzola, ancora una volta su entrambi i lati delle guance. Questo garantirà una raccolta proporzionata delle cellule della mucosa sulle quali verrà effettuato il test. Ripetere la procedura con la seconda spazzola. Ogni spazzola è provvista di setole molli, non c'è quindi nessun rischio di ferirsi.</p>	
<p>Dopo la raccolta del campione, lasciare asciugare entrambe le spazzole per trenta minuti prima di riporle nelle loro confezioni in plastica.</p>	 <p>Asciugare 30 minuti</p>
<p>Spedire immediatamente i campioni alla YSEQ.</p>	