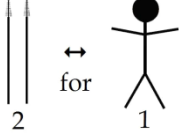

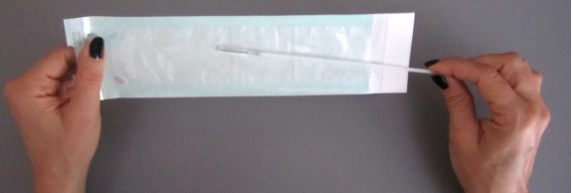
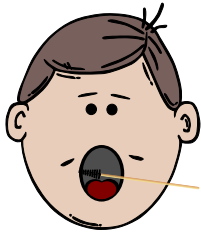




## Instrukcja do pobrania próbki DNA

<p>Pakiet składa się z dwóch próbek przeznaczonych dla jednej osoby. Każdy próbnik zawiera szczoteczkę do pobrania DNA.</p> <p>Proszę użyć obu szczoteczek do wymazu od jednej osoby.</p>	
<p>Osoba testowana nie powinna spożywać posiłku ani przyjmować płynów, jak również myć zębów przynajmniej 30 minut przed pobraniem próbki.</p>	 <p>½ godz. przed testem</p>
<p>Proszę otworzyć pakiet ze szczoteczką i delikatnie ją wyciągnąć chwytając za końcówkę.</p> <p><u>Nie należy dotykać końcówki szczoteczki na której będzie materiał DNA, aby nie zanieczyścić próbki!</u></p>	
<p>Aby pobrać materiał DNA należy włożyć szczoteczkę do jamy ustnej i pocierać nią energicznie po wewnętrznej stronie policzka kilkunastokrotnie w górę i dół wewnątrz każdego policzka.</p>	
<p>Po pobraniu materiału DNA należy wysuszyć szczoteczki przez 30 minut, zamin zostaną zapakowane do kopert.</p> <p>Szczoteczki nie mogą być ruszane przez inne osoby, aby nie zanieczyścić próbek obcym DNA!</p> <p><b>Wysuszenie próbek jest istotne, ponieważ mikro-organizmy mogą uszkodzić DNA w próbkach jeśli rozwiną się w wilgotnym środowisku.</b></p>	 <p>wysuszyć przez ok. 30 min.</p>
<p>Wysuszone próbki należy zapakować do kopert (każdą do oddzielnej).</p> <p><u>Przy pobieraniu próbek od kilku osób należy zachować szczególną ostrożność aby nie pomylić szczoteczek!</u></p>	
<p>Po prawidłowym pobraniu próbek należy je niezwłocznie odesłać. Proszę użyć koperty zwrotnej z nadrukowanym adresem laboratorium.</p> <p>Dziękujemy</p>	