

## Instruções para coleta de amostras de DNA

<p>Nós fornecemos 2 escovas para cada pessoa; cada pacote contendo uma escova. Por favor, colete duas amostras para cada pessoa.</p>	
<p>O solicitante do teste não deve comer ou beber ou escovar os dentes durante pelo menos 30 minutos antes de as amostras serem colhidas.</p>	 <p><b>30 min antes da coleta</b></p>
<p><u>Retire a escova do pacote segurando a extremidade oposta a escova. Não toque na ponta da escova!</u></p>	
<p>Para coletar a amostra de DNA, insira a escova na boca e raspe a ponta da escova no interior de cada bochecha movimentando para frente e para trás 20 vezes.</p>	
<p>Depois de coletar as amostras, deixe-as secar por 30 minutos antes de colocá-las de volta nos pacotes originais. As escovas não podem tocar em nada, pois isso pode contaminar a amostra com outros DNAs! <b>É importante secar completamente as amostras, pois se ela estiver úmida podem crescer micro-organismos que degradarão o DNA.</b></p>	 <p><b>Secagem por 30 minutos</b></p>
<p>Depois de secar as amostras, recoloca as escovas nos pacotes originais e sele cada um. <u>Tome cuidado para não confundir as amostras, se mais de uma pessoa estiver sendo testada!</u></p>	
<p>Após as amostras terem sido coletadas, elas devem ser enviadas imediatamente para o laboratório. Use a etiqueta de endereço fornecida. Obrigado.</p>	