

Руководство для проведения теста

<p>Вы получаете, на каждого соответственно, 2 щетки для взятия пробы в пластиковых оболочках. Пожалуйста, берите 2 пробы для одного тестируемого лица.</p>	
<p>За полчаса до теста тестируемые не должны принимать пищу и питьё. Перед снятием пробы прополощите полость рта водопроводной водой. Не предпринимайте никакой гигиены полости рта с зубной пастой или подобным.</p>	
<p>Откройте пластиковую оболочку с короткого конца и выньте щётку для взятия проб, не касаясь её головки. Головок щёток желаттельно не касаться, чтобы никакая чужая ДНК не фальсифицировала результат!</p>	
<p>Щетку поворачивают с внутренней стороны щек примерно 20 раз с умеренным давлением. Обращайте внимание на то, чтобы выполнялись катящееся движение щетки по всей внутренней стороне щек. Это гарантирует, что клетки слизистой оболочки принимаются равномерно. Щетка мягкая. Не существует никакой опасности ранения</p>	
<p>После взятия пробы оставте щетку просушиться 30 минут на воздухе прежде чем Вы поместите их назад в оболочку. При этом сама щётка не может подвергаться никакому способу контакта соприкосновения. Этот процесс просушивания важен, так как он предотвращает гибель проб.</p>	
<p>После отбора, пробы должны быть незамедлительно отправлены фирме YSEQ.</p>	