




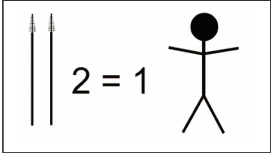

## Руководство для проведения теста

<p>Вы получаете, на каждого соответственно, 2 щетки для взятия пробы в пластиковых оболочках. Пожалуйста, берите 2 пробы для одного тестируемого лица.</p>	
<p>За полчаса до теста тестируемые не должны принимать пищу и питьё. Перед снятием пробы прополощите полость рта водопроводной водой. Не предпринимайте никакой гигиены полости рта с зубной пастой или подобным.</p>	 <p>Полчасá</p>
<p>Откройте пластиковую оболочку с короткого конца и выньте щётку для взятия проб, не касаясь её головки. <u>Головок щёток желателъно не касаться</u>, чтобы никакая чужая ДНК не фальсифицировала результат!</p>	
<p>Щетку поворачивают с внутренней стороны щек примерно <u>20 раз</u> с умеренным давлением. Обратите внимание на то, чтобы выполнялись <u>катыщееся движение</u> щетки по всей внутренней стороне щек. Это гарантирует, что клетки слизистой оболочки принимаются равномерно. Щетка мягкая. Не существует никакой опасности ранения</p>	 <p>20 раз</p>
<p>После взятия пробы оставте щетку <u>просушиться 30 минут на воздухе</u> прежде чем Вы поместите их назад в оболочку. При этом сама щётка не может подвергаться <u>никакому способу контакта</u> соприкосновения. Этот процесс просушивания важен, так как он предотвращает гибель проб.</p>	 <p>30 минут сушить</p>
<p>После отбора, пробы должны быть незамедлительно отправлены фирме YSEQ.</p>	