




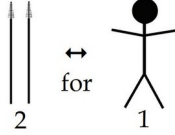


Uputstvo za upotrebu testiranja

<p>Vi dobijete po osobi dve četkice za oduzimanje <u>pljuvačka</u> iz usta i transportne vrećkice. Uzmite 2 probe za testiranje na osobu.</p>	
<p>Pola sata prije nego što uzmete probu nsmete ništa jesti ali piti. Pre nego što uzmete probu iz usta isperite usta sa čistom vodom. Nikavo nsmete usta sa pastom za zube izperiti.</p>	
<p>Otvorite vrećkicu i uzmite četkicu sa kojom uzmete probu sluznice, tako da se nedotaknete kraja četkice. Molimo vas ne bacite vrećkicu u pubre.</p>	
<p>Četkicu sa svake stranice obraza 20 puta okrećajte sa lakim pritisakom napred i natrag. Pazite na to da valjate četkice celokupno unutra obraza. Ovo omogućuje da uzmete pljuvačku <u>jednoličan</u>. Četkica je mekana. Nepostoji <u>opasnost povrede</u>.</p>	
<p>Kada ste uzili probu ostavite četkicu najmanje 30 minuta na vazduhu da se osuši pre nego stavite četkicu u vrećkicu. Ovo je vrlo važno!</p>	<p>30 min.</p> 
<p>Stavite četkicu - kada je suva – u vrećkicu natrag. Odepite beli trak i zalepите vrećkicu.</p>	
<p>Posle uzimanje probe morate probu zaisto odmah poslati u Berlin na YSEQ. U vašem testnem kompletu imate adresnu nalepnicu.</p>	