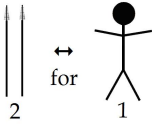


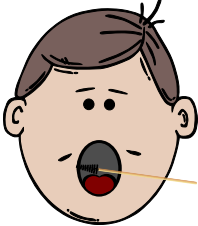




## Instrucciones para recoger las muestras de ADN

<p>Hemos suministrado 2 bastoncillos por persona; cada bolsita contiene un cepillo.</p> <p>Por favor, tome dos muestras por persona.</p>	
<p>El examinado no debe comer ni beber nada, ni cepillarse sus dientes, por lo menos 30 minutos antes de la recogida de la muestras.</p>	 <p>½ hora antes de las muestras</p>
<p>Saque el bastoncillo agarrando el palo en el extremo contrario del cepillo.</p> <p><u>¡No toque el extremo del cepillo del bastoncillo!</u></p>	
<p>Tome la muestra de ADN raspando el extremo del cepillo del bastoncillo en un movimiento de ida y vuelta un total de 10 veces en el interior de cada mejilla (dentro de la boca).</p>	
<p>Después de tomar las muestras, déjelas secar al aire durante 30 minutos antes de colocarlas de nuevo en las bolsas.</p> <p>¡Las escobillas de los cepillos no se pueden tocar, ya que esto puede contaminar la muestra con ADN extraño!</p> <p><b><i>Es importante secar las muestras por completo porque los microorganismos degradarán el ADN en las muestras, si se les permite crecer en un ambiente húmedo.</i></b></p>	 <p>secar al aire durante 30 min.</p>
<p>Después de secar las muestras, vuelva a colocar los bastoncillos dentro, y selle cada bolsa.</p> <p><u>¡Tenga cuidado - no intercambie las muestras si más de una persona está siendo testada!</u></p>	
<p>Después de haberse tomado las muestras, deben enviarse por correo de vuelta inmediatamente. Use nuestra etiqueta de dirección provista y un sobre con bordes reforzados. Gracias.</p>	